

Pharmaciens

Comment utiliser le tensiomètre de manière optimale ?

Enroulez le brassard correctement autour de votre bras gauche ; Fixez la manchette et assurez vous que le bas du brassard soit environ 2 à 3 cm au dessus de votre coude ; Gardez votre corps droit et relaxez-vous, positionnez votre brassard à la même hauteur que votre cœur ; l'allumer quand cela vous l'est demandé en cliquant une fois sur le bouton au-dessus de l'écran à droite, le déclenchement sera piloté à distance par le médecin.

La pression artérielle et le pouls seront affichés lorsque la mesure sera terminée, et le brassard dégonflé complètement.

Si le **tensiomètre** n'est pas utilisé, il s'éteindra tout seul.

Plus d'informations sous :

<https://faq.maquestionmedicale.fr/index.php?sid=26699&lang=fr&action=add&cat=0>

Référence ID de l'article : #1078

Auteur : Nada du service pro

Dernière mise à jour : 2021-01-08 12:04