

Pharmaciens

Comment utiliser le stéthoscope de manière optimale?

Avant de commencer l'examen :

- Mouchez-vous et tousez afin d'expectorer les sécrétions des voies respiratoires.
- Respirez calmement et profondément, de préférence par la bouche.

Dans l'interface MQM, lorsque le médecin lancera l'instrument de mesure, comme indiqué à votre écran, secouer légèrement l'appareil pour l'allumer et associez-le. Le médecin vous indiquera où placer l'appareil pour la prise de mesure. Une fois l'examen terminé, le médecin recevra les résultats de l'analyse effectuées à l'aide des algorithmes de l'intelligence artificielle qui compare les résultats avec plus de 12000 patients.

Si le stéthoscope n'est pas utilisé, il s'éteindra tout seul au bout de 30 s.

Le chargement se fait via son câble Usb.

Entretien et nettoyage :

Désinfecter le stéthoscope après chaque utilisation, utiliser un tampon ou un chiffon imbibé de Biseptine. Ne trempez pas le stéthoscope dans une solution de nettoyage.

Plus d'informations sous :

<https://faq.maquestionmedicale.fr/index.php?sid=26699&lang=fr&action=add&cat=0>

Référence ID de l'article : #1076

Auteur : Nada du service pro

Dernière mise à jour : 2021-01-08 12:07